

Bewaarcondities urine collecties

Analyses	Bewaarcondities (na afname)				Aanzuurmiddel/bewaarmiddel					Bewaarcondities	Bewaartermijn
	20-25°C	2-8°C	-20°C	HCl	Thymol	Toluëen (extern)	H ₂ SO ₄	Ander medium	Niet aangezuurd, geen additief		
Cortisol			x						x	invriezen	14 dagen
Aldosterone			x						x	invriezen	14 dagen
Vanillylmandelinezuur (VMA)		x					x			koelkast	28 dagen
Metanefrine		x					x		x	koelkast	28 dagen
5-HIAA		x					x			koelkast	28 dagen
Normetanefrine		x					x		x	koelkast	28 dagen
Homovanillinezuur (HVA)		x					x			koelkast	28 dagen
Adrenaline		x					x			koelkast	28 dagen
Noradrenaline		x					x			koelkast	28 dagen
Dopamine		x					x			koelkast	28 dagen
Cadmium (Cd)		x							x	koelkast	28 dagen
Koper (Cu)		x							x	koelkast	28 dagen
Zink (Zn)		x							x	koelkast	28 dagen
Jood (I)		x							x	koelkast	14 dagen
Cobalt (Co)		x							x	koelkast	28 dagen
Chroom (Cr)		x							x	koelkast	28 dagen
Andere metalen		x							x	koelkast	28 dagen
Citroenzuur		x			x					koelkast	14 dagen
Oxaalzuur		x			x	x				koelkast	14 dagen
Cysteïne			x		x				x	invriezen	14 dagen
Delta aminolevulinezuur			x						x	invriezen	14 dagen
Porfobilinogeen			x						x	invriezen	56 dagen
Coproporfyrines*			x						x	invriezen	56 dagen
Uroporfyrines			x						x	invriezen	56 dagen
Alfa-1-microglobuline		x			x	x		boorzuur, azijnzuur	x	koelkast	8 dagen
Alfa-2-macroglobuline		x			x	x		boorzuur, azijnzuur	x	koelkast	8 dagen
Albumine		x			x			boorzuur	x	Koelkast	7 dagen
Natrium		x		x	x	x	x	boorzuur, azijnzuur	x	koelkast	14 dagen
Kalium		x		x	x	x	x	mag op alles	x	koelkast	14 dagen
Chloor		x			x	x		boorzuur, azijnzuur	x	koelkast	14 dagen

Bewaarcondities urine collecties

Analyses	Bewaarcondities (na afname)				Aanzuurmiddel/bewaarmiddel					Bewaarcondities	Bewaartermijn
	20-25°C	2-8°C	-20°C	HCl	Thymol	Tolueen (extern)	H ₂ SO ₄	Ander medium	Niet aangezuurd, geen additief		
Fosfor		x		x	x	x	x	boorzuur, azijnzuur	x	koelkast	14 dagen
Calcium		x		x	x	x	x	boorzuur, azijnzuur	x	koelkast	14 dagen
Glucose		x		x	x	x	x	boorzuur, azijnzuur	x	koelkast	7 dagen
Totaal eiwit		x			x	x		boorzuur	x	koelkast	7 dagen
Magnesium		x		x	x		x	boorzuur, azijnzuur	x	koelkast	14 dagen
Ureum		x		x	x	x	x	mag op alles	x	koelkast	14 dagen
Urinezuur		x			x	x		boorzuur	x	koelkast	14 dagen
Creatinine		x		x	x	x	x	mag op alles	x	koelkast	30 dagen
Urine test strip analyse		x							x	koelkast	48 uur

*Minimum 30 mL nodig voor analyse

Legende:

■ = Procedure binnen UZ Gent ■ = niet standaard, maar wel toegelaten