

Bewaarcondities urine collecties

| Analyses                       | Bewaarcondities (na afname) |       |       |     | Aanzuurmiddel/bewaarmiddel |                  |       |                     |                                | Bewaarcondities | Bewaartermijn |
|--------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-----|----------------------------|------------------|-------|---------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|
|                                | 20-25°C                     | 2-8°C | -20°C | HCl | Thymol                     | Toluëen (extern) | H2SO4 | Ander medium        | Niet aangezuurd, geen additief |                 |               |
| Cortisol                       |                             |       | x     |     |                            |                  |       |                     | x                              | invriezen       | 14 dagen      |
| Aldosterone                    |                             |       | x     |     |                            |                  |       |                     | x                              | invriezen       | 14 dagen      |
| Vanillylmandelinezuur (VMA)    |                             | x     |       |     |                            |                  | x     |                     |                                | koelkast        | 28 dagen      |
| Metanefrine                    |                             | x     |       |     |                            |                  | x     |                     | x                              | koelkast        | 28 dagen      |
| 5-HIAA                         |                             | x     |       |     |                            |                  | x     |                     |                                | koelkast        | 28 dagen      |
| Normetanefrine                 |                             | x     |       |     |                            |                  | x     |                     | x                              | koelkast        | 28 dagen      |
| Homovanillinezuur (HVA)        |                             | x     |       |     |                            |                  | x     |                     |                                | koelkast        | 28 dagen      |
| Adrenaline                     |                             | x     |       |     |                            |                  | x     |                     |                                | koelkast        | 28 dagen      |
| Noradrenaline                  |                             | x     |       |     |                            |                  | x     |                     |                                | koelkast        | 28 dagen      |
| Dopamine                       |                             | x     |       |     |                            |                  | x     |                     |                                | koelkast        | 28 dagen      |
| <b>Cadmium (Cd)</b>            |                             | x     |       |     |                            |                  |       |                     | x                              | koelkast        | 28 dagen      |
| <b>Koper (Cu)</b>              |                             | x     |       |     |                            |                  |       |                     | x                              | koelkast        | 28 dagen      |
| <b>Zink (Zn)</b>               |                             | x     |       |     |                            |                  |       |                     | x                              | koelkast        | 28 dagen      |
| <b>Jood (I)</b>                |                             | x     |       |     |                            |                  |       |                     | x                              | koelkast        | 14 dagen      |
| <b>Cobalt (Co)</b>             |                             | x     |       |     |                            |                  |       |                     | x                              | koelkast        | 28 dagen      |
| <b>Chroom (Cr)</b>             |                             | x     |       |     |                            |                  |       |                     | x                              | koelkast        | 28 dagen      |
| <b>Andere metalen</b>          |                             | x     |       |     |                            |                  |       |                     | x                              | koelkast        | 28 dagen      |
| <b>Citroenzuur</b>             |                             | x     |       |     | x                          |                  |       |                     |                                | koelkast        | 14 dagen      |
| <b>Oxaalzuur</b>               |                             | x     |       |     | x                          | x                |       |                     |                                | koelkast        | 14 dagen      |
| <b>Cysteïne</b>                |                             |       | x     |     | x                          |                  |       |                     | x                              | invriezen       | 14 dagen      |
| <b>Delta aminolevulinezuur</b> |                             |       | x     |     |                            |                  |       |                     | x                              | invriezen       | 14 dagen      |
| <b>Porfobilinogeen</b>         |                             |       | x     |     |                            |                  |       |                     | x                              | invriezen       | 56 dagen      |
| <b>Coproporfyrines*</b>        |                             |       | x     |     |                            |                  |       |                     | x                              | invriezen       | 56 dagen      |
| <b>Uroporfyrines</b>           |                             |       | x     |     |                            |                  |       |                     | x                              | invriezen       | 56 dagen      |
| <b>Alfa-1-microglobuline</b>   |                             | x     |       |     | x                          | x                |       | boorzuur, azijnzuur | x                              | koelkast        | 8 dagen       |
| <b>Alfa-2-macroglobuline</b>   |                             | x     |       |     | x                          | x                |       | boorzuur, azijnzuur | x                              | koelkast        | 8 dagen       |
| <b>Albumine</b>                |                             | x     |       |     | x                          |                  |       | boorzuur            | x                              | Koelkast        | 7 dagen       |
| <b>Natrium</b>                 |                             | x     |       | x   | x                          | x                | x     | boorzuur, azijnzuur | x                              | koelkast        | 14 dagen      |
| <b>Kalium</b>                  |                             | x     |       | x   | x                          | x                | x     | mag op alles        | x                              | koelkast        | 14 dagen      |
| <b>Chloor</b>                  |                             | x     |       |     | x                          | x                |       | boorzuur, azijnzuur | x                              | koelkast        | 14 dagen      |

## Bewaarcondities urine collecties

| Analyses                        | Bewaarcondities (na afname) |       |       |     | Aanzuurmiddel/bewaarmiddel |                  |                                |                     |                                | Bewaarcondities | Bewaartermijn |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-----|----------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|
|                                 | 20-25°C                     | 2-8°C | -20°C | HCl | Thymol                     | Tolueen (extern) | H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> | Ander medium        | Niet aangezuurd, geen additief |                 |               |
| Fosfor                          |                             | x     |       | x   | x                          | x                | x                              | boorzuur, azijnzuur | x                              | koelkast        | 14 dagen      |
| Calcium                         |                             | x     |       | x   | x                          | x                | x                              | boorzuur, azijnzuur | x                              | koelkast        | 14 dagen      |
| Glucose                         |                             | x     |       | x   | x                          | x                | x                              | boorzuur, azijnzuur | x                              | koelkast        | 7 dagen       |
| Totaal eiwit                    |                             | x     |       |     | x                          | x                |                                | boorzuur            | x                              | koelkast        | 7 dagen       |
| Magnesium                       |                             | x     |       | x   | x                          |                  | x                              | boorzuur, azijnzuur | x                              | koelkast        | 14 dagen      |
| Ureum                           |                             | x     |       | x   | x                          | x                | x                              | mag op alles        | x                              | koelkast        | 14 dagen      |
| Urinezuur                       |                             | x     |       |     | x                          | x                |                                | boorzuur            | x                              | koelkast        | 14 dagen      |
| Creatinine                      |                             | x     |       | x   | x                          | x                | x                              | mag op alles        | x                              | koelkast        | 30 dagen      |
| <b>Urine test strip analyse</b> |                             | x     |       |     |                            |                  |                                |                     | x                              | koelkast        | 48 uur        |

\*Minimum 30 mL nodig voor analyse

Legende:

■ = Procedure binnen UZ Gent    ■ = niet standaard, maar wel toegelaten